



SOLUTION DÉSINFECTANTE POUR DISPOSITIFS MÉDICAUX ET SURFACES GÉNÉRALES

ANIOSPRAY QUICK

SOLUTION DÉSINFECTANTE

Désinfection à action rapide des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool; et des surfaces générales (application biocide).

Solution prête à l'emploi

- Sur base éthanol
- Large spectre d'activité en temps court
- Ne laisse pas de trace au séchage
- Odeur agréable
- Formulation sans colorant



ANIOSPRAY QUICK

SOLUTION DÉSINFECTANTE



Aniospray Quick
1L



Aniospray Quick
5L

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

- Produit prêt à l'emploi
- Liquide limpide incolore
- Densité à 20°C : environ 0,9
- pH à + 20°C : environ 5,5

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

| EFFICACITÉ | TEMPS DE CONTACT |
|---|-----------------------|
| EN 13697* (Bactéricide) | 30 sec |
| EN 13697* (Levuricide) | 30 sec |
| EN 13697* (Fongicide) | 5 min |
| EN 13727* (Bactéricide) | 30 sec |
| EN 13624* (Levuricide) | 30 sec |
| EN 13624* (Fongicide) | 5 min |
| EN 14348* (Tuberculocide) | 30 sec |
| EN 14348* (Mycobactéricide) | 5 min |
| EN 14476* (Actif sur les virus enveloppés) | 30 sec |
| EN 14476* (Virucide à spectre limité) (Adenovirus / Norovirus (MNV)) | 5 min 30 sec/5 min |
| EN 16777* (Actif sur les virus enveloppés) | 30 sec |
| EN 16777* (Virucide à spectre limité) (Adenovirus / Norovirus (MNV)) | 5 min 30 sec/5 min |

* Conditions de propreté

INFORMATION

| PRODUIT | CONDITIONNEMENT | RÉFÉRENCE |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|
| ANIOSPRAY QUICK | 12 flacons de 1L + 4 pulvérisateurs | 2084.073 |
| ANIOSPRAY QUICK | 4 bidons de 5L | 2084.034 |



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribué par :
LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

INDICATIONS

Désinfection à action rapide des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool; et des surfaces générales (application biocide).

MODE D'EMPLOI

Solution prête à l'emploi.

S'utilise sur des surfaces et dispositifs médicaux préalablement nettoyés.

Pulvériser sur les zones à traiter jusqu'à ce qu'elles soient totalement humectées. Appliquer en quantité suffisante (+/- 40 ml/m²). Un mouillage complet de toutes les surfaces à désinfecter est important. Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile sauf pour les surfaces en contact avec la peau ou les muqueuses. Pour la fréquence d'utilisation, se référer au plan d'hygiène en place.

Veuillez consulter les instructions d'utilisation du fabricant pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux. Vérifier avant application la compatibilité des zones à traiter avec l'alcool.

Les appareils électriques à désinfecter seront hors tension.

COMPOSITION

Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 550 mg/g), Propionate de N,N-didécyloxyéthyl ammonium (N°CAS 94667-33-1: 1.1 mg/g), parfum.

CERTIFICATS


Dispositif médical. L'ensemble des activités antimicrobiennes d'ANIOSPRAY QUICK est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur demande.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockage : entre +5°C et +25°C.

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX ET DES BIOCIDES.

Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.

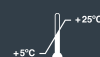

USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.



www.anios.com